

## Aufsetzanleitung:



Nehmen Sie die Atemschutzmaske aus der Verpackung, falten Sie diese auf und ziehen Sie die Bänder zu beiden Seiten auseinander. Prüfen Sie die Maske optisch auf Beschädigungen.



Legen Sie die Atemschutzmaske so in die Hand, dass der Nasenbereich nach oben zeigt. Führen Sie nun die Atemschutzmaske an Ihr Gesicht – zuerst Kinn einsetzen, danach über die Nase ziehen. Seitliche Ohrbänder fixieren.



Für den richtigen Dichtsitz ist es erforderlich, den Clip im Nasenbereich anzudrücken und der Kontur anzupassen.



Prüfen der Dichtigkeit – Maske mit beiden Händen bedecken und kräftig ausatmen. Bei leichtem Druckaufbau in der Maske (Ausatmen) sollte keine Luft an den Rändern entweichen. Bei richtiger Anwendung bewegt sich das Filtermaterial beim Einatmen leicht.

Bitte **entsorgen** Sie benutzte Masken immer **im Restmüll**.

Weitere Informationen und Angaben zu den Masken, die Sie erhalten haben (incl. der Zertifikate) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte „folgen“ Sie der CE-Kennzeichnung!



Albert-Schweitzer-Apotheke



Scheffel Apotheke